

CLEARFIL™ SE BOND

O “PADRÃO OURO” DOS SISTEMAS ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES

SELAMENTO MARGINAL DURADOURO
MENOR SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA
BAIXA SENSIBILIDADE À TÉCNICA





CLEARFIL™ SE BOND

ALTO DESEMPENHO EM SUAS MÃOS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Alta resistência de união

Condicionamento suave

Baixa sensibilidade à técnica

VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTES

- ✓ Excelente selamento marginal a longo prazo
- ✓ Alta estabilidade e durabilidade ao longo do tempo
- ✓ Menor risco de cáries secundárias


- ✓ Menor sensibilidade pós-operatória
- ✓ Excelente resistência de união devido à adesão química do monômero MDP aos cristais de hidroxiapatita restantes ao redor da rede de fibras de colágeno

- ✓ Alta tolerância a erros
- ✓ Sem passo de lavagem: Procedimento sem secagem ou umidade excessiva das fibras colágenas expostas

O EXCELENTE DESEMPENHO DO CLEARFIL™ SE BOND FOI COMPROVADO EM UM ESTUDO CLÍNICO DE 13 ANOS!

Com o estudo clínico de 13 anos publicado pela renomada Universidade Católica de Leuven, Bélgica, em 2015, o CLEARFIL™ SE BOND comprovou sua excelente eficácia clínica com e sem condicionamento seletivo de esmalte (taxa de retenção de 96% a 100%¹ em ambos procedimentos!). Assim, o CLEARFIL™ SE BOND mostra resultados de excelente qualidade.

¹ Thirteen-year randomized controlled clinical trial of a two-step self-etch adhesive in non-carious cervical lesions.
Dent Mat 2015 Peumans M, De Munck J, Van Landuyt K, Van Meerbeek B

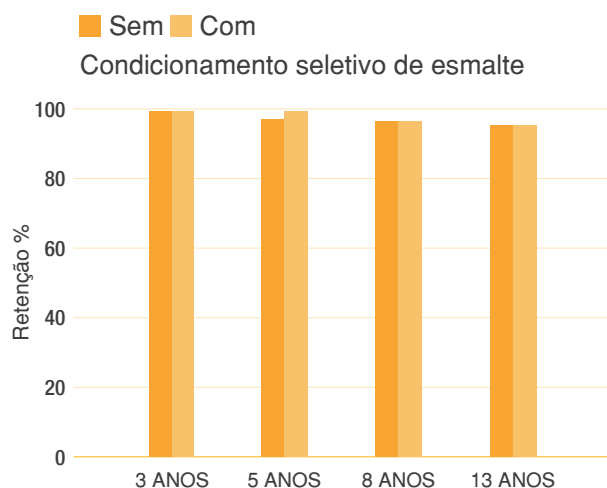

EXCELENTE SELAMENTO MARGINAL A LONGO PRAZO

1. O monômero MDP original é o responsável por uma adesão química excepcionalmente estável entre o adesivo e a estrutura dental - resistente à hidrólise*.
2. Devido ao condicionamento suave do CLEARFIL™ SE BOND, a camada de hidroxiapatita permanece uniforme ao redor das fibras de colágenas, proporcionando assim uma proteção contra a hidrólise.
3. O selamento marginal é ainda mais reforçado pela baixa sorção de água do adesivo do CLEARFIL™ SE BOND.

Em consequência, forma-se uma adesão duradoura entre o material restaurador e o dente com um selamento marginal excepcionalmente estável a longo prazo. O risco de cáries secundárias é minimizado.


*Definição de hidrólise: a) a decomposição (separação) da adesão química entre o adesivo e o dente (esmalte e dentina) por uma reação à água/saliva, e b) a destruição das fibras colágenas por enzimas.

MENOR SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA

Alta e duradoura resistência de união previne a formação de GAP entre o dente e o material restaurador para evitar a movimentação do fluido dentinário.

- Excelente selamento da hidroxiapatita e dos túbulos dentinários graças ao adesivo com maior viscosidade
- Formação de uma camada de adesão estável que proporciona maior resistência à compressão


→ Assim, o movimento do fluido dentinário, a causa da sensibilidade pós-operatória, dificilmente ocorre.

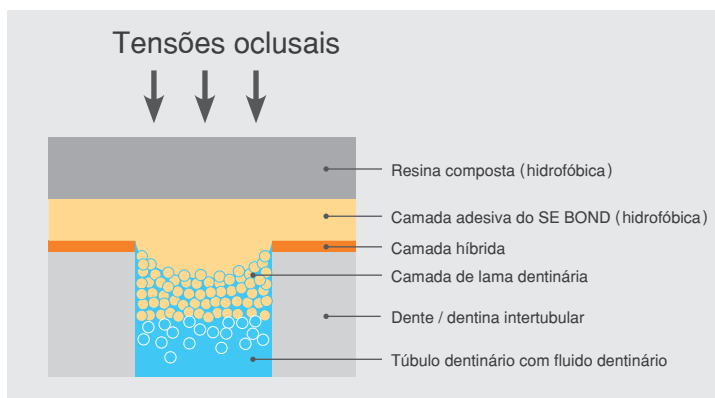

EXCELENTE RESISTÊNCIA DE UNIÃO E DURABILIDADE

O CLEARFIL™ SE BOND contém o monômero MDP original da Kuraray. Hoje, o MDP conta com mais de 25 anos de comprovação científica e um excelente desempenho adesivo.

O CLEARFIL™ SE BOND oferece uma forte retenção mecânica, mas também uma forte adesão química. Como resultado, o CLEARFIL™ SE BOND garante uma excelente resistência de união e durabilidade da restauração a longo prazo.

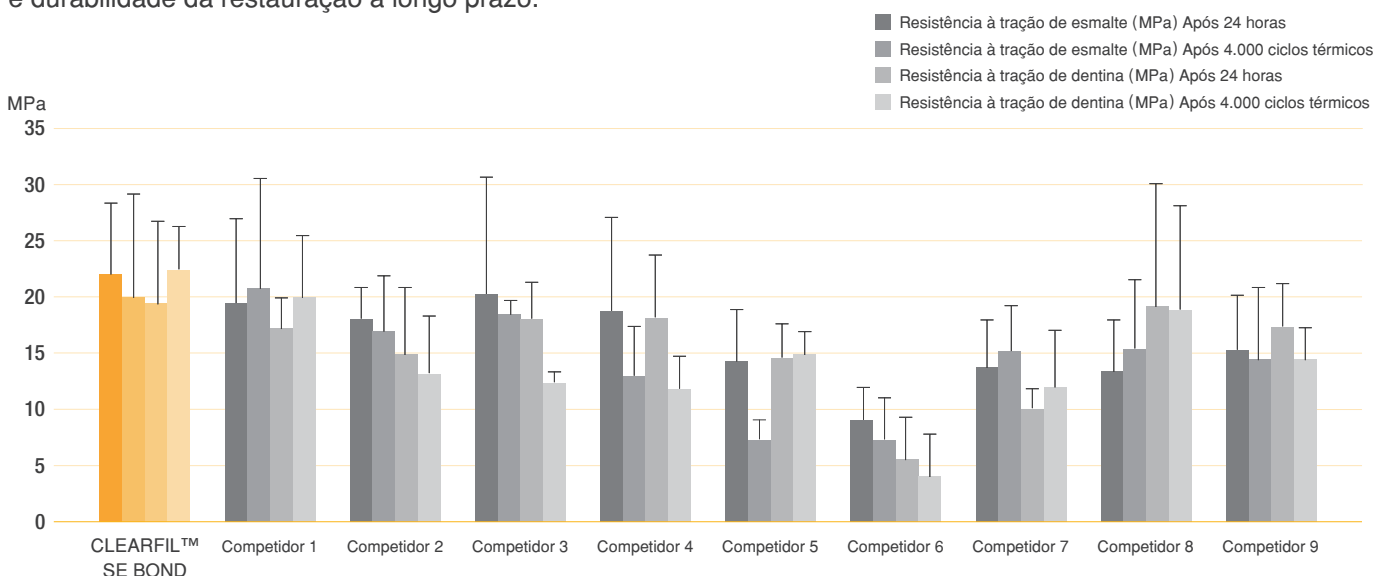

Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.

UTILIZAÇÃO OTIMIZADA E BAIXA SENSIBILIDADE À TÉCNICA

Com o CLEARFIL™ SE BOND, não é necessário o condicionamento com ácido fosfórico, nem um passo de lavagem. Além disso, o nível de umidade da superfície dentinária é menos crítico. O risco de umidade ou secagem excessiva do preparo é muito baixo em comparação com sistema de condicionamento total de esmalte e dentina. Combinando o procedimento de aplicação simplificado com a baixa sensibilidade à técnica, o CLEARFIL™ SE BOND consegue alcançar com facilidade o alto desempenho de adesão desejado.

APLICAÇÃO FÁCIL E PRECISA

Primer



- Aplicar o PRIMER e deixar agir durante 20 seg.
- Não lavar
- Aplicar um leve jato de ar

Adesivo



- Aplicar o BOND e distribuir uniformemente com leve jato de ar
- Fotoativar durante 10 segundos

Restaurar



Aplicar e fotoativar o compósito

INTELLY CASE

Sistema para dosagem fácil e precisa aliado ao armazenamento conveniente.



AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES

- Restaurações diretas preenchidas com compósitos ou compômeros fotopolimerizáveis
- Selamento de cavidade como um pré-tratamento para restaurações indiretas
- Tratamento de superfície de raízes expostas e/ou com hipersensibilidade
- Reparos intraorais de lascamentos de coroas feitas de porcelana, cerâmica híbrida ou resina composta utilizando compósitos fotopolimerizáveis
- Tratamento de superfície de restaurações protéticas feitas em porcelanas, cerâmica híbrida e resina composta fotopolimerizável.

CLEARFIL™ SE BOND Kit

#1970-WD

Primer (6 ml), Bond (5 ml), 2 x 50 disposable brush tips, 2 brush tip handles, 1 mixing dish, 1 light blocking plate, 1 outer case (Intelly Case)



CLEARFIL™ SE BOND Introductory Kit

#1975-WD

CLEARFIL™ SE BOND

#1981-WD

5 ml



CLEARFIL™ SE BOND PRIMER

#1982-WD

6 ml



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Website www.kuraraynoritake.com

- Antes de utilizar este produto, certifique-se de ler as Instruções de Uso fornecidas pelo fabricante.
- As especificações e a aparência do produto estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.
- A cor impressa pode diferir ligeiramente da cor real.

"CLEARFIL" é uma marca comercial da KURARAY CO., LTD

Importado no Brasil por:

KURARAY SOUTH AMERICA LTDA.

Av. Paulista Nº 1636, sala 405, Bela Vista, CEP: 01310-200-São Paulo/SP

CNPJ 12.333.284/0001-17

Responsável Técnico: Luiz Augusto Vieira - CRF/SP 30996

Registro ANVISA Nº: 81777910008

IM37-01 12/2019